

Mepilex® Lite

Imukykyinen pehmeän silikonin vaahtosidos

- Ei aiheuta vauriota haavalle ja sitä ympäröivälle iholle sidosta poistettaessa
- Mukautuu hyvin kehon eri osiin

Ohut vaahtotyyny


- Imee eritteitä
- Mukautuu kehon muotoihin
- Pysyy ehjänä

Kalvotausta

- Lämpäisee höyryä
- Vedenkestävä

SafetaC® kerros (pehmeä silikon)

- Ei aiheuta vauriota haavalle ja sitä ympäröivälle iholle poistettaessa
- Ei kiinnity erittäväan kosteaan haavapintaan, vaan kuivaan ympäröivään ihoon
- Vähentää maseraatoriskiä

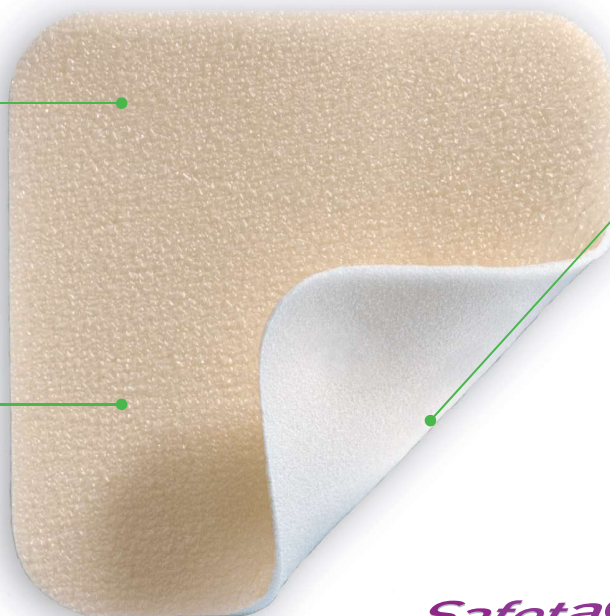


SafetaC
TECHNOLOGY

Miten Mepilex Lite toimii

Mepilex Lite on erittäin mukautuvainen sidos, joka imee tehokkaasti eritteitä ja ylläpitää kostea haavaympäristöä. Safetac kerros kiinnittyy haavaa ympäröivään ihoon, estäen eritteen valumasta ympäröivään ihoon eli pitää maseraatoriskin alhaisena. Safetac kerros varmistaa sidoksen vaihdon ilman vauriota. Mepilex Lite voidaan leikata kehon eri alueille sopivaksi.


Miten Mepilex Litea käytetään

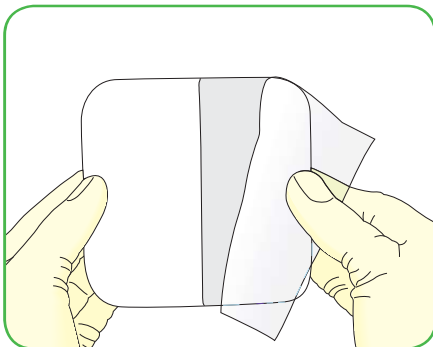

Puhdista haava-alue yleisen käytännön mukaisesti. Kuivaa haava ympäröivä ihoalue hyvin. Käytä suojakalvoa hyväksi sidoksen paikalleenasettelussa.



Aseta kiinnittyvä pinta haavaa vasten. Mepilex Lite tulee ulottua vähintään 2 cm haavaa ympäröivälle iholle. Tarvittaessa Mepilex Litea voidaan leikata.

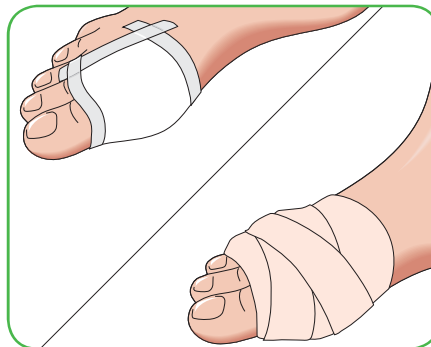

Mikäli tarpeellista, varmista Mepilex Liten kiinnitys teipillä, rullasidoksella tai muulla kiinnitysmateriaalilla.

Mepilex Liten edut

- Ei vaurioita haavaa ja sitä ympäröivää ihoa sidosta poistettaessa
- Vähentää potilaalle aiheutuvaa kipua sidoksen poiston yhteydessä
- Vähentää maseraatoriskiä
- Mukautuu hyvin kehon muotoihin
- Ohut ja miellyttävän tuntuinen iholla
- Helppo käyttää
- Ylläpitää kostea haavaympäristöä
- Voidaan leikata
- Voidaan jättää paikoilleen sädetyksen ajaksi kun käytetään yleisiä energiarajoja ja absorboituneita annoksia.



Mölnlycke Health Care
Pitäjänmäentie 14, 3 krs
00380 Helsinki
Puh. 0201 622 300, Fax. 0201 622 310
www.mölnlycke.com

Mölnlycken symboli ja tekstikuvake ovat
Mölnlycke Health Caren rekisteröityjä tavaramerkkejä

Käyttöalueet

Mepilex Lite on suunniteltu vähän tai ei lainkaan erittävien haavojen hallintaan, kuten sääri- ja jalkahaavat, painehaavat, keskisyvät painehaavat, säteilystä johtuvat ihovauriot ja Epidermolysis Bullosa. Mepilex Lite voidaan käyttää myös hauraan ihon suojana, painesiteen alla sekä yhdessä geelien kanssa.

Huomaa

Mikäli haavassa esiintyy merkkejä kliinisestä infektiosta, ota yhteyttä terveysalan ammatilaiseen infektihoitoa varten

Safetac® Teknologia

Safetac on patentoitu pehmeän silikonin kiinnitysteknologia. Safetac takaa hellävaraisen ja varman kiinnittymisen. Safetac vähentää haavalle ja sitä ympäröivälle iholle aiheutuvaa vauriota ja kipua sidosta poistettaessa.

Referenssit:

Dahlström KK. A New Silicon Rubber Dressing used as a Temporary Dressing before Delayed Split Skin Grafting. Scand J Plast Reconstr. Hand Surg. 1995;29:325-327 Platt A J, et al. A Comparative Study of Silicone Net Dressing and Paraffin Gauze Dressing in skin-Grafted sites. Burns 1996;22:7:543-545. Dykes P, et al. Effect of Adhesive Dressings on the Stratum Corneum of Normal Skin Journal of Wound Care, 2001;10:2:7-10.

Valikoima

Tuotenumero	Koko cm	Kpl/osastopakkaus	Kpl/kuljetuspakkaus
284000	6 × 8,5	5	70
284100	10 × 10	5	50
284300	15 × 15	5	50
284500	20 × 50	4	24

Steriilisti yksittäispakattu