


ABSO SATIN –VUODESUOJA SATIINILIUKUOSALLA JA KAHVOILLA

TARKISTA TUOTTEEN TURVALLISUUS

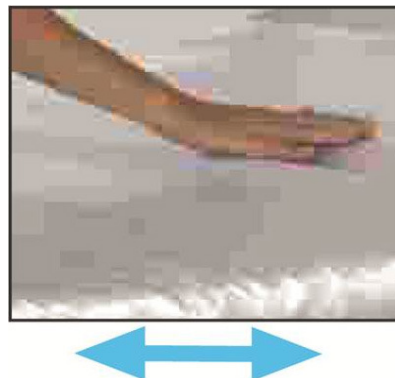

Visuaalinen tarkistus:

Tarkista, että materiaali ja saumat ovat ehjät.
Varmista, ettei materiaali ole kulunut tai valkaistu.



Mekaaninen kuorma tai paino:

Tarkista kahvojen kunto ja varmista, etteivät kahvojen saumat ole kuluneet.



Turvallisuuden toteaminen:

Taivuta vuodesuojaa varovasti ja varmista, että tuote on edelleen elastinen, mutta tuntuu silti tasaiselta ja tukevalta.



Kitkan tarkistus:

Varmista, että vuodesuojan pinta on karkea ja tarjoaa hyvän tartuntapinnan siirtoalustoille. Vertaa tarvittaessa uuteen tuotteeseen.

KAHVAT HELPOTTAVAT HENKILÖN LIIKKUTTEUA JA SIIRTELYÄ.
KAHVAT EIVÄT OLE TARKOITETTU HENKILÖN NOSTOON.

VARMISTA TUOTTEEN MOITTEETON KUNTO!

Vuodesuoja kuluu käytössä. Tarkista tuote säännöllisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Poista vahingoittunut tuote käytöstä.