



AKTIIVINEN PUHDISTUS TEHOKAS DESINFIOINTI

Sekusept™ aktiv ja Sekusept™ aktiv -testiliuskat

PERETIKKAHAPPOPOHJAINEN DESINFIOINTIAINE, JOLLA ON ERINOMAINEN PUHDISTUSTEHO

Sekusept aktiv yhdistää aktiivisen puhdistuksen, tehokkaan desinfiointin ja erinomaisen materiaalien yhteensopivuuden yhdessä tuotteessa ja tarjoaa parhaat ominaisuudet käyttäjälle, potilaalle ja instrumentille.

Sekusept aktiv on myös:

- Nopea viruksellinen terminaalidesinfektio
- Poistaa aktiivisesti proteiinitahrat
- Ei kiinnittävää vaikutusta



Sekusept™ aktiv

Peretikkahappopohjainen desinfiointiaine, jolla on erinomainen puhdistusteho

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Valkoinen jauhe, jossa on sinisiä rakeita
- pH 2 % liuoksen vesijohtovesi 20 °C:ssa: noin 8,5 +/- 0,5
- pH 1 % liuos vesijohtovedessä 20 °C:ssa: noin 8,5 +/- 0,5

MIKROBIOLOGISET OMINAISUUDET

VÄITTEET/EDELLYTYKSET	PITOISUUS	KONTAKTIAIKA
Bakteereita tappava EN 13727/EN 14561:n mukaan Puhtaat ja likaiset olosuhteet	1 %	5 min
Hiivaa tappava EN 13624/EN 14562:n mukaan Puhtaat ja likaiset olosuhteet	1 %	5 min** 10 min*
Sieniä tappava EN 13624/EN 14562:n mukaan Puhtaat olosuhteet	2 %	30 min
Tuberkuloosibakteereja tappava EN 14348/EN 14563:n mukaan Likaiset olosuhteet	1 %	10 min
Mykobakteereja tappava EN 14348/EN 14563:n mukaan Puhtaat olosuhteet	2 %	15 min
Rajoitettu viruksia tappava EN 14476/EN 17111:n mukaan Puhtaat ja likaiset olosuhteet	1 %	10 min
Virusidinen EN 14476/EN 17111:n mukaan Puhtaat olosuhteet	2 %	15 min
Sporisidinen EN 17126:n mukaan Puhtaat olosuhteet	2 %	30 min
Sporisidinen C. difficile -bakteeria vastaan EN 17126:n mukaan Puhtaat olosuhteet	1 %	15 min
VAH:n mukaan (tappaa bakteereita, hiivoja ja tuberkuloosia) Puhtaat ja likaiset	1 % 2 %	60 min* (5 min) **

* =Puhdistus- ja desinfiointivaihe (likaiset olosuhteet)
**= Desinfiointivaihe (puhtaat olosuhteet)

PAKKAUS- JA TILAUSTIEDOT

TUOTE	PAKKAUSYKSIKÖ	TILAUSKOODI
Sekusept aktiv -astiai mittalusikalla	4 x 1,5 kg	XXXXXX
Sekusept aktiv -astiai mittakupilla	6 kg	XXXXXX
Sekusept aktiv -testiliuskat	4 putkiloa, 50 liuskaa	XXXXXX

KÄYTTÖALUE

Lääkinnällisten laitteiden manuaaliseen puhdistukseen ja desinfiointiin sekä terminaalidesinfiointiin.

KÄYTTÖOHJEET

Käytä käyttöliuoksen valmistukseen mukana toimitettua mittalusikkaa/mittakuppia. Lisää veteen (<30 °C) sekoittaen tarvittava määrä jauhetta vaaditun tehon saavuttamiseksi ja toista useaan kertaan ensimmäisen 15 minuutin aikana. Vaikuttava aine peretikkahappo muodostuu liuosta valmistettaessa. Upota instrumentit varmistaen, että kaikki pinnat ovat täysin märkiä. Puhdista instrumentit niiden valmistajan ohjeiden mukaisesti, mukaan lukien mekaaniset toimet (esim. harjaus, pyyhkiminen), kunnes ne ovat silmämääräisesti puhtaita. Irrota instrumentit vaaditun vaikutusajan jälkeen ja huuhtelee huolellisesti vähintään juomaveden laatuksella vedellä. Kuivaa ulkopinnat ja sisäiset kanavat (esim. endoskoopit) sen jälkeen. Valmistele terminaalidesinfiointia varten yksi kylpy puhdistus-desinfiointivaihetta varten ja yksi kylpy desinfiointivaihetta varten.

Liuoksen jäljellä oleva teho esim. lämpötilan noustessa voidaan tarkistaa Sekusept™ aktiv -testiliuskojen avulla. Ei sovellu messingistä tai kuparista valmistetuille instrumenteille eikä mekaanisesti esikäsitellyille kromatuille tai nikkelöidyille instrumenteille.

Liuos on valmistettava uudelleen jokaista työpäivää varten. Näkyvän kontaminaation sattuessa valmistetaan välittömästi uusi liuos.

Jauheen lievä värjäytyminen on mahdollista, mutta sillä ei ole vaikutusta tuotteen suorituskykyyn.

AINESOSAT

Natriumperkarbonaatti, ionittomat tensidit, fosfonaatit. 2 % liuoksen aktiiviset sisällöt varsinaiseen käyttöön: > 1 000 ppm peretikkahappoa.

SÄILYTYS

Vaarallista. Noudata käyttöä koskevia varotoimia (jotka on laadittu kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskevien voimassa olevien eurooppalaisten sääntöjen mukaisesti). Varastointi: välillä +0 °C ja +25 °C.

SERTIFIKAATIT

Lääkinnällinen laite. Sekusept aktiv -valmisteen täysi antimikrobinen aktiivisuus on sisällytetty tuotteeseen tieteelliseen asiakirja-aineistoon, joka on saatavilla pyynnöstä.

LÄÄKINNÄLLISTEN LAITTEIDEN TURVALLINEN KÄYTTÖ..

Lue etiketti ja tuotetiedot.




+0 °C

Sekusept™ -testiliuskat

INDIKAATIOT

Sekusept aktiv 50 testiliuskaa.

KÄYTTÖOHJEET

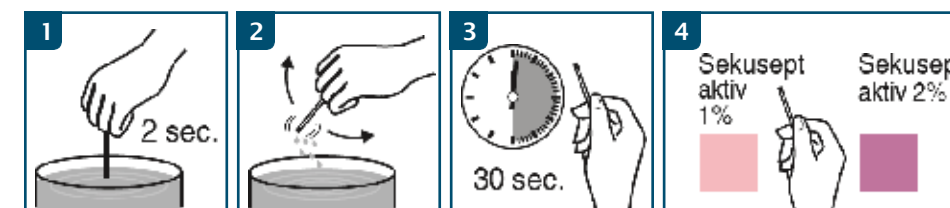

Upota testitikun reaktiovyöhykke liuokseen 2 sekunniksi.

Ravista liuskasta ylimääräinen neste pois.

Odota 30 sekuntia ja vertaa reaktiovyöhykettä vastaavaan värikenttään.

Tulkinta - vertaa reaktiovyöhykkeen väriä valittuun pitoisuuteen: Sama tai voimakkaampi = täysin aktiivinen Vaaleampi tai vähemmän voimakas = vaihda liuos

SÄILYTYSOLOSUHTEET


Sulje putki välittömästi sen jälkeen, kun olet poistanut tarvittavat testiliuskat. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Pidä poissa auringonvalolta. Suojaa sisältö kosteudelta. Vain kertakäyttöön.

KÄYTTÖVAROITUKSIA


Vain ammattikäyttöön.

INSTRUMENTTIEN
UDELLENKÄSITTELY

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LUKEMA 30
SEKUNNIN
KULUTTUA:



Sekusept aktiv

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

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.

**ECOLAB
VIGILANCE**
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland



**ECOLAB DEUTSCHLAND
GmbH**
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am
Rhein Germany



www.ecolab.com