


Technical Data sheet


BALTIC MASKS, BM-027 FFP2 NR D (v 3.00)

FFP2-suojausluokan BM-027 hengityssuojain on tehty käytettäväksi ympäristöissä, joiden hengitysilmassa voi olla haitallisia hiukkasia. Hengityssuojaimet muodostavat esteen vähintään 94 prosentille yli 0,3 mikronin suuruista hiukkasista, ja niitä voidaan käyttää ympäristöissä, joissa vaaralliset aineet ylittävät OEL-arvot enintään kymmenkertaisesti. Neljästä erilaisesta kerroksesta kuitukangasmateriaalia koostuva suodatusjärjestelmämme suojaa käyttäjää vaaditun hengityksensuojauksen lisäksi myös epämiellyttäviltä hajuilta ja hiukkasilta.

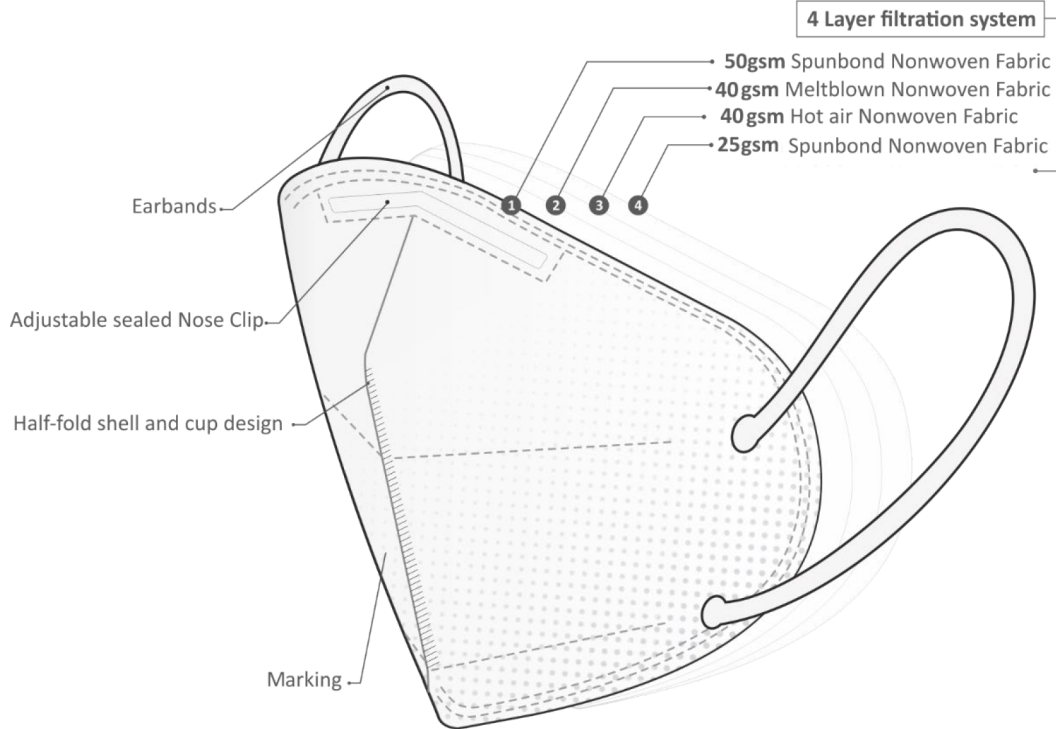

Standardi: EN149:2001+A1:2009

Lisävaruste: BM-027 Kiinnitysklipsi korvalenkeille*.

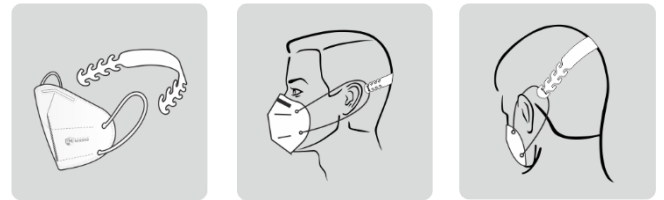

*Lisävarusteena kiinnitysklipsi pään takaa

Filteröintitehokkuus: $\geq 94\%$

Nimitys: NR - Non reusable (kertakäyttöinen), D - läpäissyt dolomiittitukostestin.

Technical Data sheet

BALTIC MASKS, BM-027 FFP2 NR D (v 3.00)

PPE -merkintä:




Käytetyt materiaalit:

50gsm Spunbond Nonwoven Fabric
40gsm Meltblown Nonwoven Fabric
40gsm Hot air Nonwoven Fabric
25gsm Spunbond Nonwoven Fabric

Maskin paino: 5 g

Pakkaus:

10 kpl uudelleensuljettavassa muovipussissa, 80 pussia laatikossa

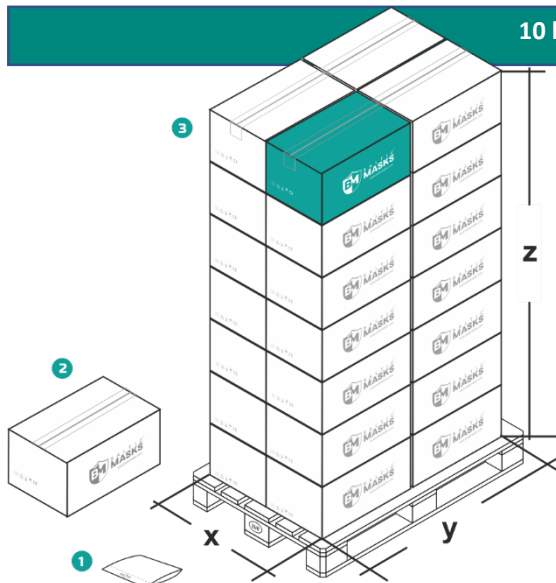



- Koko:** 185mm (y) x 240mm (x) x 25mm (z)
Määrä: 1 pkt (10 kpl)
- Koko:** 590mm (y) x 380mm (x) x 280mm (z)
Määrä: 1/80 pkt (800 kpl)
- Koko:** 1180mm (y) x 760mm (x) x 1960mm (z)
Määrä: 28/80 pkt (22 400 kpl)

2022/03/29

Technical Data sheet

BALTIC MASKS, BM-027 FFP2 NR D (v 3.00)

ENG**BM-027****FFP2 NR D** Usage instruction

 Do not wear with beards or other facial hair that may inhibit contact between the face and edge of the respirator

1. Avaa maski sivuille käyttäen kumpaakin kättä apunasi.
2. Suorista nenäklipsi.
3. Aseta maski kasvoillesi siten, että se peittää nenän ja suun. Varmista, etteivät korvalenkit jää maskin ja kasvojesi väliin.
4. Vedä korvalenkit korviesi taakse. Säädä maskia siten, että se istuu kasvoillesi miellyttävästi.
5. **Asettele nenäklipsi siten, että se mukautuu tiiviisti nenävarteesi etkä tunne, että ilma karkaa sivuilta.**
6. **Painele maskin reunat kummallakin kädellä tiiviisti kasvojesi vasten.**
HUOM! Hyvä istuvuus on tuotteen toimivuuden kannalta kriittistä!

**Precaution**

2. Tuote ei tuota happea eikä sovellu käytettäväksi hapettomissa ympäristöissä, vedenalaisissa toiminnoissa, evakuointi- tai palontorjuntaympäristöissä.
3. Tämän suojamaskin käyttöä ei suositella, mikäli et tunne maskin muodostavan tiivistä suojaa kasvojen ja maskin reunan välillä käytön aikana.
4. Jos käytön aikana havaitaan, että maski on vaurioitunut tai hengitysvastus muodostuu liian suureksi, vaihda maski uuteen.
5. Tuote on tarkoitettu kertakäyttöiseksi, eikä suojusta tule käyttää uudelleen. Suositeltu käyttöaika on 4-8 tuntia.
6. On epätodennäköistä, että vaatimukset tiiviydelle täyttyvät, mikäli kasvojen karvoitus estää maskin tiiviin istuvuuden kasvoilla.
VAROITUS! Tuote ei ole tulenkestävä, eikä sitä saa käyttää alueilla, joissa on avotulta.

**Warning - this product is not flame resistant and must not be used in areas with open flames**

Tuotteet on suunniteltu suojaamaan sekä kiinteiltä että nestemäisiltä aerosoleilta.

**BALTIC MASKS, UAB Savanoriu ave. 178F, Vilnius, Lithuania****CE ilmoitettu laitos: Polski Rejestr Statkow S.A (NB ID: 1463)**

Tämä käyttöohje on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 vaatimusten mukaisesti. Linkki vaatimustenmukaisuusvakuutukseen ja CE-todistukseen: www.balticmasks.com

2022/03/29